



	36-39
	40-43
	44-47

SKARPETY ELASTYCZNE

OCIEPLACZ LECZNICZY
Z ZASTOSOWANIEM
WEŁNY OWCZEJ

JAK STOSOWAĆ:

- Po zabiegach fizykoterapeutycznych* (okładach, elektroterapii, ultradźwiękach itp.) w celu utrzymania efektu terapeutycznego osłaniać okolice ciała poddane zabiegowi.
- Zakładać ocieplacze na chore stawy i mięśnie zwłaszcza w porach roku o niższej temperaturze powietrza i zwiększonej wilgotności.
- W przypadkach zaburzenia czucia oraz wszelkich dolegliwościach bólowych używać ocieplaczy jak najczęściej [całodobowo bądź też kilka godzin dziennie].
- Nasze ocieplacze nie krepują ruchów i można stosować je pod ubrania wierzchnie.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zasięgnąć porady lekarza lub fizjoterapeuty.

Skład surowcowy :

warstwa wewnętrzna: 100% wełny w runie

warstwa zewnętrzna: 73% poliester, 27% elastan

SKARPETY ELASTYCZNE
OCIEPLACZ LECZNICZY Z ZASTOSOWANIEM WEŁNY OWCZEJ



Wyprodukowano w UE.

Data wydania: 15.10.13



LOT:

REF:

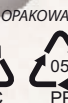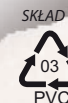



SKARPETY ELASTYCZNE

OCIEPLACZ LECZNICZY
Z ZASTOSOWANIEM
WEŁNY OWCZEJ

Ocieplacz leczniczy z zastosowaniem wełny owczej to połączenie najnowszych technologii włókienniczych z unikatowym działaniem włókna wełnianego. Nasz produkt został opracowany w celu uzupełnienia leczenia farmakologicznego i fizjoterapii. Jest to niezbędny element terapii dla utrzymania odpowiedniego komfortu cieplnego, kluczowego w leczeniu wielu schorzeń. Wełna, jako jedyne włókno naturalne, posiada zdolność natychmiastowego zapewnienia i utrzymania na właściwym poziomie ciepła dla naszych tkanek. Higroskopijność wełny powoduje, że nadmiar wilgoci zostaje wchłonięty, a szczególnie budowa włosa gwarantuje optymalną wymianę powietrza pomiędzy naszym ciałem a otoczeniem. Dodatkowym atutem włosa wełnianego jest również korzystne, mechaniczne drażnienie receptorów czuciowych wywołujące efekt mikromasażu, co istotne jest w terapii przeciwbólowej i w przypadku niedokrwienia. Wełna to niezwykle surowiec, poznaj jego dobroczynne działanie stosując nasze ocieplacze.

WSKAZANIA:

- Choroba niedokrwienna kończyn spowodowana miażdżycą, niedowładem lub porażeniem kończyn po udarze mózgu oraz w obrażeniach obwodowego układu nerwowego.
- Przewlekłe choroby układu ruchu, zwłaszcza dotyczące stawów ze zmianami zwyrodnieniowymi.
- Przewlekłe choroby narządów wewnętrznych (serca, wątroby, płuc) z zaburzeniami czucia powierzchniowego.
- Dolegliwości, którym towarzyszy zwiększone napięcie mięśni.
- Stosować przy wychłodzeniach organizmu, oraz wybranych partii ciała, zwłaszcza w przypadkach nawracających stanach zapalnych i infekcji.

Wspomagają efektywność i jakość snu, co powoduje skrócenie procesu regeneracyjnego u osób zarówno ze schorzeniami somatycznymi jak i zaburzeniami psychicznymi.

RODZAJE ZABIEGÓW, po których należy zastosować wyroby wełniane:

*częściowa kąpiel parafinowa, *okłady parafinowe, *rozgrzewające okłady żelowe, *nagrzewanie termoforem, *elektroterapia – aplikacja prądu działającego przeciwbólowo i zmniejszającego napięcie mięśniowe, *krioterapia- izolacje zewnętrzna po schłodzeniu, *ultradźwięki, *diatermia krótkofalowa, *naświetlania lampą Sollux, *masaż klasyczny, *masaż wirowy i podwodny.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:



Prać i płukać w temp. 30°C – proces łagodny.

Nie stosować bielenia.

Suszyć w stanie rozłożonym.

Nie wirować.

Nie prasować.

Można czyścić chemicznie – proces łagodny.

Nie usuwać plam rozpuszczalnikami.

Nie prać z wyrobami innego typu.

Nie należy przechowywać wyrobów zabrudzonych.

POWINIENES WIEDZIEĆ:

Nie stosować u osób uczulonych na wełnę.

Nie należy stosować na uszkodzoną skórę – w tym odleżyny. Nie należy stosować u osób z ostrymi stanami zapalnymi tkanek miękkich oraz ostrymi stanami zapalnymi narządów ruchu. Stosowanie wyrobów rehabilitacyjnych z dzianin wełnianych wraz z dodatkowymi środkami lub urządzeniami rozgrzewającymi należy uzgodnić z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Dla osób wrażliwych, bądź uczulonych na działanie drażniące włókien wełnianych, zaleca się używanie produktów wełnianych dodatkowo zabezpieczonych tkaniną ochronną przed ewentualnym przedostawaniem się włókien wełnianych do oczu, nosa i gardła.